


## **Praluent 150 mg solución inyectable en pluma precargada** alirocumab

### **Instrucciones de uso**

En la siguiente imagen se muestran las partes de la pluma de Praluent.

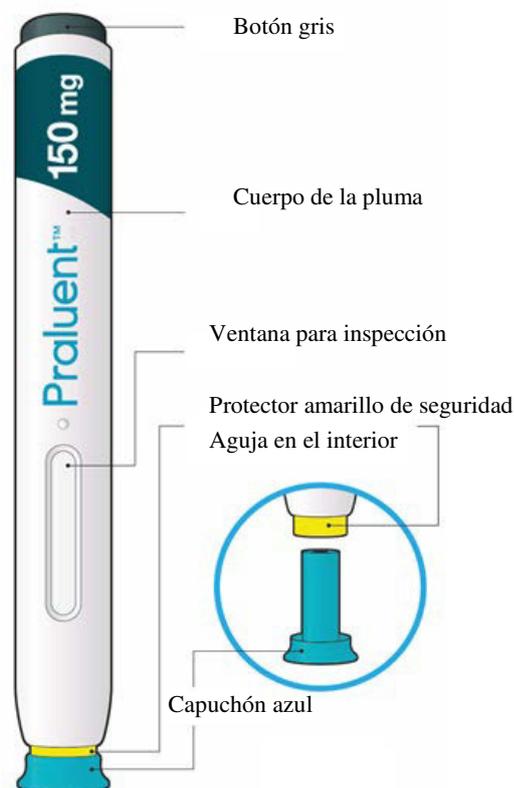

Para un  
solo uso

### **Información importante**

- Se trata de una pluma precargada de un solo uso. Contiene 150 mg de Praluent (alirocumab) en 1 ml.
- El medicamento se inyecta bajo la piel y puede administrárselo usted mismo u otra persona (cuidador).
- Esta pluma se debe usar solamente para una inyección y luego se debe desechar.

### **Qué debe hacer**

- ✓ Mantener la pluma de Praluent fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la pluma de Praluent.
- ✓ Siga estas instrucciones cada vez que use una pluma de Praluent.
- ✓ Conserve las plumas sin usar en la nevera entre 2 °C y 8 °C. Para más información sobre condiciones de conservación, ver el prospecto aparte de Praluent.

### **Qué no debe hacer**

- ✗ No toque el protector amarillo de seguridad.
- ✗ No utilice la pluma si se ha caído al suelo o está dañada.
- ✗ No utilice la pluma si falta el capuchón azul o no está firmemente sujeto.
- ✗ No reutilice la pluma.
- ✗ No agite la pluma.
- ✗ No congele la pluma.
- ✗ No exponga la pluma a la luz solar directa.

Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero o llame al número de sanofi-aventis que aparece en el prospecto.

## PASO A: preparación de la inyección

### Antes de empezar necesitará:

- la pluma de Praluent
- toallitas empapadas en alcohol
- bolita de algodón o gasa
- un contenedor para objetos punzantes (ver paso B, 8).


### ① Mirar la etiqueta de la pluma.

- Compruebe que contiene el medicamento correcto y la dosis correcta.
- Compruebe la fecha de caducidad de la pluma; no la utilice si está caducada.



### ② Mirar la ventana para inspección.

- Compruebe que el líquido es transparente, entre incoloro y amarillo pálido y que no contiene partículas; en caso contrario, no utilizar la pluma (ver imagen A).
- Es posible que vea una burbuja de aire. Eso es algo normal.
- No utilice la pluma si la ventana para inspección tiene un color amarillo sólido (ver imagen B).

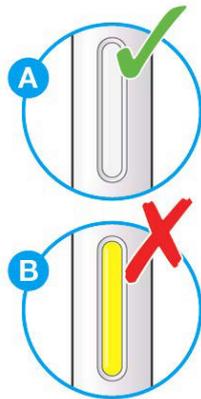


### ③ Deje que la pluma se atempere a temperatura ambiente de 30 a 40 minutos.

- Deje que la pluma se atempere por sí sola, no intente calentarla.
- No vuelva a meter la pluma en la nevera.

### ④ Preparar el lugar de la inyección.

- Lávese las manos con agua y jabón y séqueselas con una toalla.
- Puede inyectárselo en:
  - el muslo
  - el vientre (salvo en la zona de 5 cm alrededor del ombligo)
  - la parte superior externa de su brazo (Ver imagen).
- Para inyectarse puede estar de pie o sentado.


- Limpie la piel en la zona de la inyección con una toallita empapada en alcohol.
- No escoja una zona de la piel que esté dolorida, endurecida, enrojecida o inflamada.
- No escoja una zona cercana a una vena visible.
- Inyéctese cada vez en una zona diferente.
- No se inyecte Praluent conjuntamente con otros medicamentos inyectables en la misma zona.

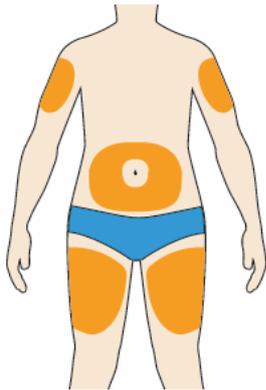

### **PASO B: cómo inyectarse**

**① Después de completar todos los pasos del “Paso A: preparación de la inyección”, retire el capuchón azul.**

- No retire el capuchón hasta que esté preparado para inyectarse.
- No vuelva a colocar el capuchón azul.

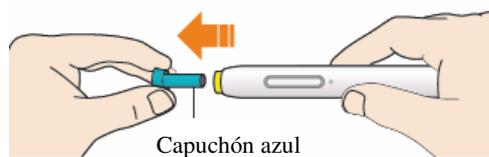


**② Sostener la pluma de Praluent de la siguiente manera.**

- No toque el protector amarillo de seguridad.
- Asegúrese de que se vea la ventana para inspección.



**③ Presionar el protector amarillo de seguridad sobre la piel formando un ángulo aproximado de 90°.**

- Presione y agarre con firmeza la pluma contra el cuerpo hasta que el protector amarillo de seguridad ya no quede a la vista. La pluma no funcionará si el protector amarillo de seguridad no está pulsado totalmente.
- Si es necesario, pellizque la piel para asegurarse de que el lugar de la inyección es firme.

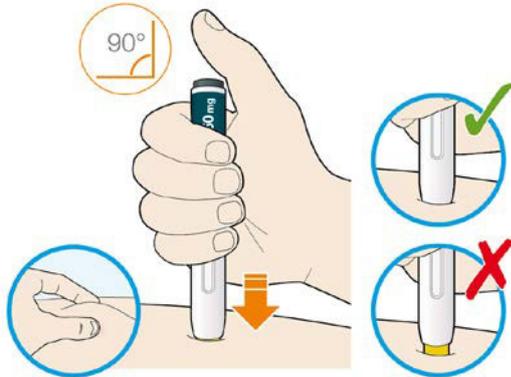


**④ Presionar y soltar inmediatamente el botón pulsador gris con el pulgar.**

- Escuchará un clic. En ese momento habrá empezado la inyección.
- La ventana para inspección comenzará a ponerse de color amarillo.




**⑤ Mantener la pluma contra la piel después de soltar el botón pulsador.**

- La inyección puede durar hasta 20 segundos.

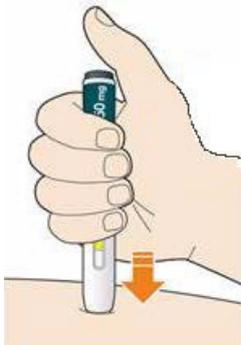


**⑥ Comprobar si la ventana para inspección está de color amarillo antes de retirar la pluma.**

- No retire la pluma hasta que toda la ventana para inspección esté amarilla.
- La inyección se habrá completado cuando la ventana para inspección se haya vuelto completamente amarilla y puede que escuche un segundo clic.
- Si la ventana para inspección no se vuelve completamente amarilla, llame a sanofi-aventis para solicitar ayuda. No se administre una segunda dosis sin hablar antes con su médico, farmacéutico o enfermero.

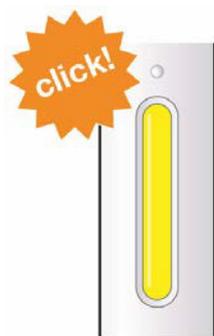

**⑦ Retirar la pluma de la piel.**

- No frote la superficie de la piel después de la inyección.
- Si se produce alguna hemorragia, presione el lugar de la inyección con una bolita de algodón o gasa hasta que deje de sangrar.

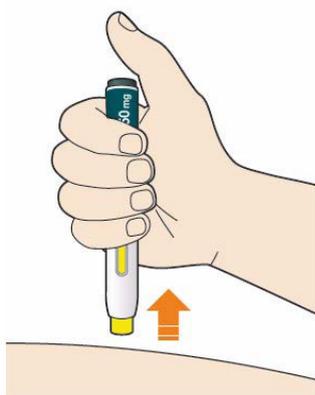

**⑧ Desechar la pluma y el capuchón.**


- No vuelva a colocar el capuchón azul.
- Deseche la pluma y el capuchón en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- Pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero cómo deshacerse del contenedor.
- Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños.



## **Praluent 75 mg solución inyectable en jeringa precargada** alirocumab

### **Instrucciones de uso**

En la siguiente imagen se muestran las partes de la jeringa de Praluent.

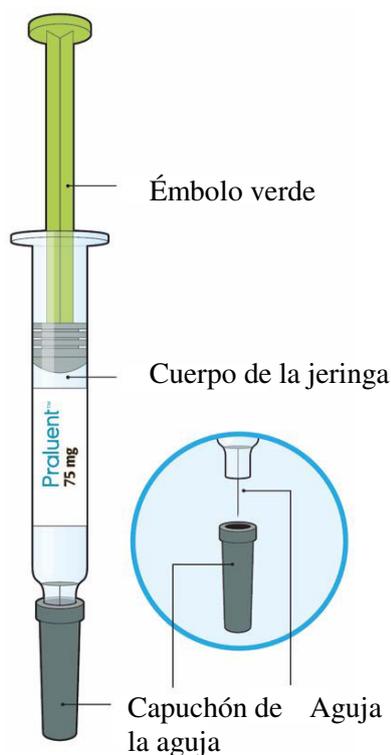

### **Información importante**

- Se trata de una jeringa precargada de un solo uso. Contiene 75 mg de Praluent (alirocumab) en 1 ml.
- El medicamento se inyecta bajo la piel y puede administrárselo usted mismo u otra persona (cuidador).
- Esta jeringa se debe usar solamente para una inyección y luego se debe desechar.

### **Qué debe hacer**

- ✓ Mantener la jeringa de Praluent fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la jeringa de Praluent.
- ✓ Siga estas instrucciones cada vez que use una jeringa de Praluent.
- ✓ Conserve las jeringas sin usar en la nevera entre 2 °C y 8 °C. Para más información sobre condiciones de conservación, ver el prospecto aparte de Praluent.

### **Qué no debe hacer**

- ✗ No toque la aguja.
- ✗ No utilice la jeringa si se ha caído al suelo o está dañada.
- ✗ No utilice la jeringa si falta el capuchón gris de la aguja o no está firmemente sujeto.
- ✗ No reutilice la jeringa.
- ✗ No agite la jeringa.
- ✗ No congele la jeringa.
- ✗ No exponga la jeringa a la luz solar directa.

**Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero o llame al número de sanofi-aventis que aparece en el prospecto.**