

Instrucciones de uso de Ozempic 0,25 mg solución inyectable en pluma precargada

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su pluma precargada Ozempic.


No utilice la pluma sin haber recibido la formación adecuada de su médico o enfermero. Utilice solamente el medicamento de esta pluma cómo se le ha prescrito.

Empiece comprobando la pluma para **asegurarse de que contiene Ozempic 0,25 mg** y después observe las siguientes imágenes para familiarizarse con las distintas partes de la pluma y la aguja.

Si es usted invidente o tiene visión reducida y no puede leer el contador de dosis de la pluma, no utilice esta pluma sin ayuda. Busque ayuda de una persona que vea bien y esté formada en el uso de la pluma precargada Ozempic.


Su pluma es una pluma precargada dosificadora. Contiene 2 mg de semaglutida y puede seleccionar únicamente dosis de 0,25 mg. La pluma está diseñada para ser utilizada con agujas desechables NovoFine y NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. El envase incluye agujas NovoFine Plus.

Ozempic pluma precargada y aguja (ejemplo)

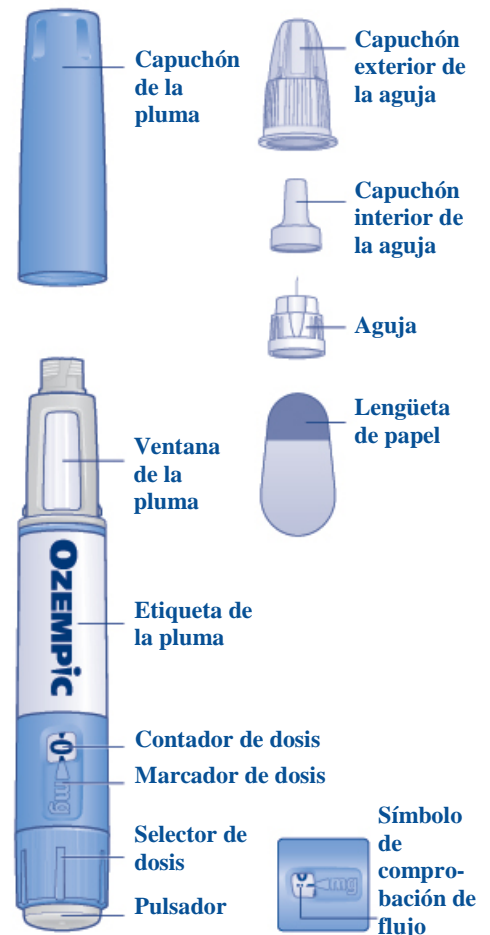


1. Preparación de la pluma con una aguja nueva


- **Compruebe el nombre y el color de la etiqueta** de su pluma para asegurarse de que contiene Ozempic. Esto es especialmente importante si utiliza más de un tipo de medicamento inyectable. El uso de un medicamento incorrecto podría causar graves daños a su salud.
- **Retire el capuchón de la pluma.**

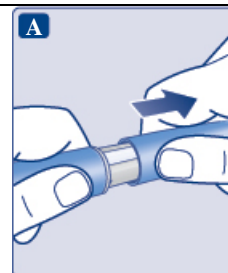
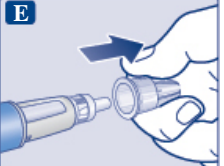
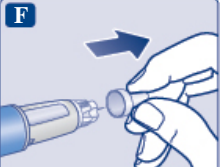


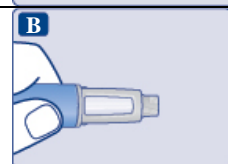


- **Compruebe que la solución de la pluma es transparente e incolora.** Mire a través de la ventana de la pluma. Si la solución tiene un aspecto turbio o coloreado, no utilice la pluma.

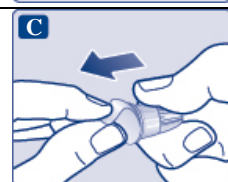

- **Coja una aguja nueva** y retire la lengüeta de papel. Si la lengüeta de papel está rota, no utilice la aguja ya que la esterilidad de esta no está garantizada.

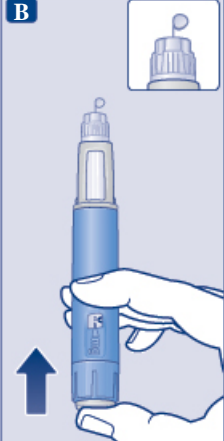

<ul style="list-style-type: none"> • Coloque la aguja recta en la pluma. Enrósquela hasta que quede apretada. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Retire el capuchón exterior de la aguja y guárdelo para más tarde. Lo necesitará después de la inyección para retirar la aguja de la pluma de forma segura. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Retire el capuchón interior de la aguja y deséchelo. Si intenta volver a colocarlo, se podría pinchar accidentalmente con la aguja. <p>Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja. Esto es normal, pero a pesar de ello debe comprobar el flujo si se trata de una pluma nueva y es la primera vez que la utiliza. Consulte el paso 2 “Comprobación del flujo”.</p> <p>No coloque una aguja nueva en la pluma hasta que esté listo para ponerse la inyección.</p>	
<p>⚠ Utilice siempre una aguja nueva para cada inyección. Así se reduce el riesgo de que las agujas se atasquen, contaminación, infección y dosificación inexacta.</p>	
<p>⚠ Nunca utilice una aguja doblada ni dañada.</p>	
<p>2. Comprobación del flujo</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el flujo antes de la primera inyección con cada pluma nueva. Si la pluma está ya en uso, vaya al paso 3, “Selección de la dosis”. • Gire el selector de dosis hasta que en el contador de dosis aparezca el símbolo de comprobación de flujo (). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sujete la pluma con la aguja apuntando hacia arriba. Presione y mantenga presionado el pulsador hasta que el contador de dosis vuelva a 0. El 0 debe quedar alineado con el marcador de dosis. Una gota de solución debe aparecer en la punta de la aguja. 	
<p>Puede que una pequeña gota se quede en la punta de la aguja, pero no se inyectará. Si no aparece ninguna gota, repita el paso 2 “Comprobación del flujo” un máximo de 6 veces. Si aún no se ve ninguna gota, cambie la aguja y repita el paso 2 “Comprobación del flujo” una vez más. Si, a pesar de todo, no aparece ninguna gota, deseche la pluma y utilice una nueva.</p>	
<p>⚠ Asegúrese siempre de que aparezca una gota en la punta de la aguja antes de utilizar una pluma nueva por primera vez. Así se asegura de que la solución fluye. Si no aparece ninguna gota, no se inyectará medicamento, aunque el contador de dosis se mueva.</p>	

Esto puede indicar que la aguja está obstruida o dañada.

Si no comprueba el flujo antes de la primera inyección con cada nueva pluma, es posible que no reciba la dosis prescrita ni logre el efecto previsto de Ozempic.

3. Selección de la dosis

- **Gire el selector de dosis hasta seleccionar 0,25 mg.** Continúe girando hasta que el contador de dosis se detenga y muestre 0,25 mg.



Solamente el contador de dosis y el marcador de dosis mostrarán que se han seleccionado 0,25 mg. El selector de dosis emite un clic diferente cuando se gira hacia delante, hacia atrás o supera 0,25 mg. No cuente los clics de la pluma.


- ⚠ **Antes de inyectarse este medicamento, utilice siempre el contador de dosis y el marcador de dosis para ver que ha seleccionado 0,25 mg.**

No cuente los clics de la pluma.


La dosis de 0,25 mg en el contador de dosis tiene que estar alineada de manera exacta con el marcador de dosis para asegurar que recibe la dosis correcta.

4. Inyección de la dosis


- **Introduzca la aguja bajo la piel** tal como le ha enseñado su médico o enfermero.
- **Compruebe que puede ver el contador de dosis.** No lo tape con los dedos. Esto podría interrumpir la inyección.

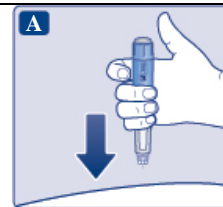


- **Presione y mantenga presionado el pulsador hasta que el contador de dosis muestre 0.** El 0 debe quedar alineado con el marcador de dosis. En ese momento puede que oiga o note un clic.

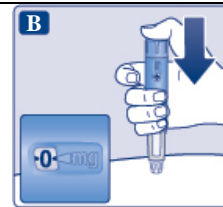

- **Mantenga la aguja bajo la piel** después de que el contador de dosis haya vuelto a 0 y **cuente lentamente hasta 6.** Esto garantiza que se administra la dosis completa.
- Si extrae antes la aguja, puede que vea salir solución de la punta de la aguja. En tal caso, no se habrá administrado la dosis completa.

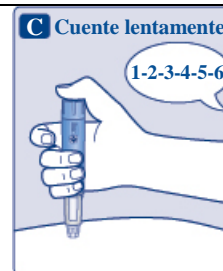

- **Extraiga la aguja de la piel.** Si aparece sangre en el lugar de inyección, presione ligeramente. No frote la zona.

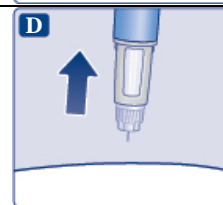

Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja después de la inyección. Esto es normal y no afecta a su dosis.

- ⚠ **Observe siempre el contador de dosis para saber cuántos mg se inyecta.** Mantenga presionado el pulsador hasta que el contador de dosis indique 0.

Cómo detectar si la aguja está obstruida o dañada




- Si no aparece el 0 en el contador de dosis después de presionar continuamente el pulsador, puede

- que haya usado una aguja obstruida o dañada.
- En este caso, **no** habrá recibido nada de medicamento, incluso aunque el contador de dosis se haya movido de la dosis original que fijó.

Qué hacer si la aguja está obstruida

Cambie la aguja tal como se describe en el paso 5 “Después de la inyección” y repita todos los pasos desde el paso 1 “Preparación de la pluma con una aguja nueva”. Asegúrese de seleccionar la dosis completa que necesita.

No toque nunca el contador de dosis durante la inyección. Esto puede interrumpir la inyección.

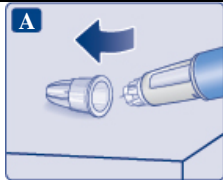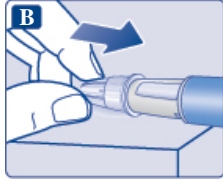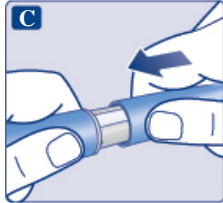5. Después de la inyección	
<ul style="list-style-type: none"> • Introduzca la punta de la aguja en su capuchón exterior, colocado sobre una superficie plana, sin tocar la aguja ni el capuchón exterior. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la aguja quede protegida, presione con cuidado el capuchón exterior de la aguja hasta el fondo. • Desenrosque la aguja y deséchela con cuidado de acuerdo con la normativa local. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero sobre la eliminación de elementos punzantes. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ponga el capuchón a la pluma después de cada uso para proteger la solución de la luz. 	
<p>Deseche siempre la aguja después de cada inyección para garantizar que las inyecciones se administran correctamente y evitar que las agujas se atasquen. Si la aguja está obstruida, no se inyectará nada de medicamento.</p> <p>Cuando deseche la pluma, hágalo sin la aguja puesta, siguiendo las instrucciones de su médico, enfermero o farmacéutico o de las autoridades locales.</p>	
<p>⚠ No intente volver a poner nunca el capuchón interior en la aguja. Se podría pinchar con la aguja.</p> <p>⚠ Retire siempre la aguja de la pluma inmediatamente después de cada inyección. Así se reduce el riesgo de que las agujas se atasquen, contaminación, infección, pérdida de solución y dosificación inexacta.</p>	
<p>⚠ Otra información importante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga siempre la pluma y las agujas fuera de la vista y del alcance de otras personas, especialmente de los niños. • Nunca comparta la pluma ni las agujas con otras personas. • Las personas que atienden a los pacientes deben tener mucho cuidado cuando manejen agujas usadas para evitar pinchazos accidentales e infecciones. 	
<p>Mantenimiento de su pluma</p> <p>Trate la pluma con cuidado. La manipulación brusca o el uso indebido pueden causar una dosificación inexacta. Si esto sucede, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • No se inyecte Ozempic que haya estado congelado. Si lo hace, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento. • No se inyecte Ozempic que haya estado expuesto a luz solar directa. Si lo hace, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento. • No esponga la pluma a polvo, suciedad ni líquidos. • No lave, moje ni lubrique la pluma. Si es necesario, límpiela con un paño humedecido con un detergente suave. • Procure que la pluma no se caiga ni golpee contra superficies duras. Si se le cae la pluma o 	

sospecha que pueda tener un problema, coloque una aguja nueva y compruebe el flujo antes de inyectarse.

- **No intente rellenar la pluma.**
- **No trate de reparar la pluma** ni desmontarla.